




ZenSeat® Administration för enhetschefer



Översikt roller

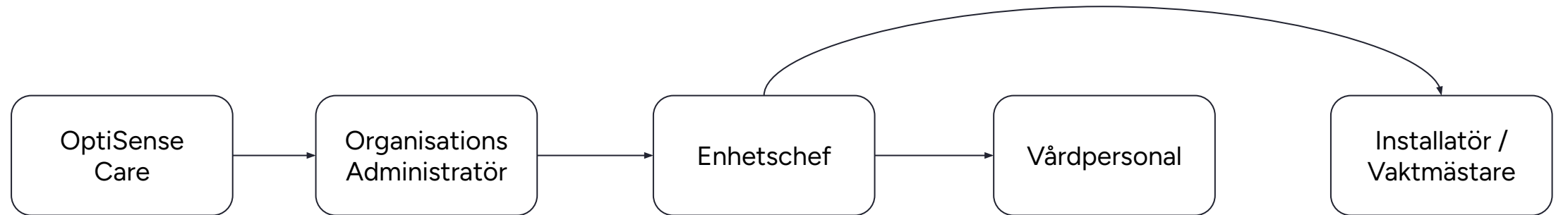

ROLL

- Lägg till kommuner
- Lägg till administratörer

- Lägg till vårdboenden
- Lägg till fler administratörer
- Lägg till enhetschefer

- Flytta ZenSeats mellan rum i systemet
- Aktivera och inaktivera ZenSeats (genom att starta/avsluta vårdeperioder)

- Läsa besöks-loggar i appen, i telefon eller på dator
- Hantera larm

- Lägg till nya ZenSeat till systemet med 'ZenSeat Installer'-appen
- Montera nya ZenSeats på toaletter
- Fysiskt flytta ZenSeat mellan toaletter på vårdboendet

KAN ÄVEN

- Administrera hela systemet

- Läsa besöks-loggar i appen, i telefon eller på dator
- Hantera larm
- Bjuda in vårdpersonal till appen
- Flytta ZenSeats mellan rum och vårdboenden i systemet
- Lägg till nya ZenSeat till systemet med 'ZenSeat Installer'-appen

- Läsa besöks-loggar i appen, i telefon eller på dator
- Hantera larm
- Lägg till nya ZenSeat till systemet med 'ZenSeat Installer'-appen

- Lägg till nya ZenSeat till systemet med 'ZenSeat Installer'-appen



Hur når man admin-portalen?

Öppna en webbläsare och surfa in på:

<https://app.zenseat.ai/admin/>

Enhetschefens administrativa roll

- Lägga till de rum på vårdboendet som ska ha en ZenSeat®
- Starta och stoppa vårdperioder för enskilda rum
 - *Om ett rum inte längre har en ZenSeat® stoppar man vårdperioden så att detta rum inte syns i vårdpersonalens app*
 - *Om ett rum har en ZenSeat® men för närvarande är utan boende stoppar man också vårdperioden. Detta för att vårdpersonalen inte ska få falska larm om uteblivna toalettbesök och begynnande förstoppningar.*
- Om en ZenSeat® flyttas till ett annat rum är det Enhetschefen som
 - Vid behov lägger till det nya rummet i systemet
 - Talar om för systemet vilket rum enheten har flyttats till
 - Startar vårdperioden i det nya rummet och stoppar vårdperioden i det gamla rummet
- Enhetschefen kan **inte**
 - Lägga till nya användare för vårdpersonalens app. Detta gör organisationsadministratören
 - Radera enheter från systemet

Översikt admin-gränssnitt

Val av sida/vy.

The screenshot shows the admin interface for 'Vårdboende Ett'. At the top, there is a navigation bar with a logo, 'Vårdboenden', 'Användare', and 'Enheter'. On the right, there is a user profile 'HH Helle Helleson'. Below the navigation bar, there is a breadcrumb 'Helsingborgs Stad > Vårdboende Ett' and a title 'Vårdboende Ett'. A search bar with the text 'Sök' and a magnifying glass icon is on the left. On the right, there is a blue button 'Skapa rum +'. Below these, there is a table with the following columns: 'Rum ^', 'Vårdperiod', 'Vårdperiod påbörjad', 'Vårdperiod avslutad', and 'Senaste session'. The table contains 8 rows of data. The first two rows have a red 'x' in the 'Vårdperiod' column, while the others have a green checkmark. The dates in the 'Vårdperiod påbörjad' and 'Vårdperiod avslutad' columns are in blue. At the bottom left of the table, it says 'Visar 1 till 8 av 8 resultat'.

Rum ^	Vårdperiod	Vårdperiod påbörjad	Vårdperiod avslutad	Senaste session
Rum 102	✗	--	--	--
Rum 113	✗	--	--	--
Rum 115	✓	2026-07-28, 07:53	--	2026-09-09, 08:34
Rum 118	✓	2026-02-12, 09:09	--	2026-09-09, 07:47
Rum 120	✗	--	--	--
Rum 124	✗	--	--	--
Rum 201	✓	2025-11-27, 07:58	--	2026-09-09, 04:06
Rum 202	✓	2026-05-11, 08:26	--	2026-09-08, 18:42

Meny för inställningar och utloggning.

Lista över vårdboendets registrerade rum.

Lägg till rum i systemet.

Meny för redigering av rum samt start eller stopp av vårdperiod.




Rummet är aktivt och syns i appen

När startade eller avslutades vårdperioden?

När registrerade rummets ZenSeat® ett toalettbesök sist?

Översikt admin-gränssnitt

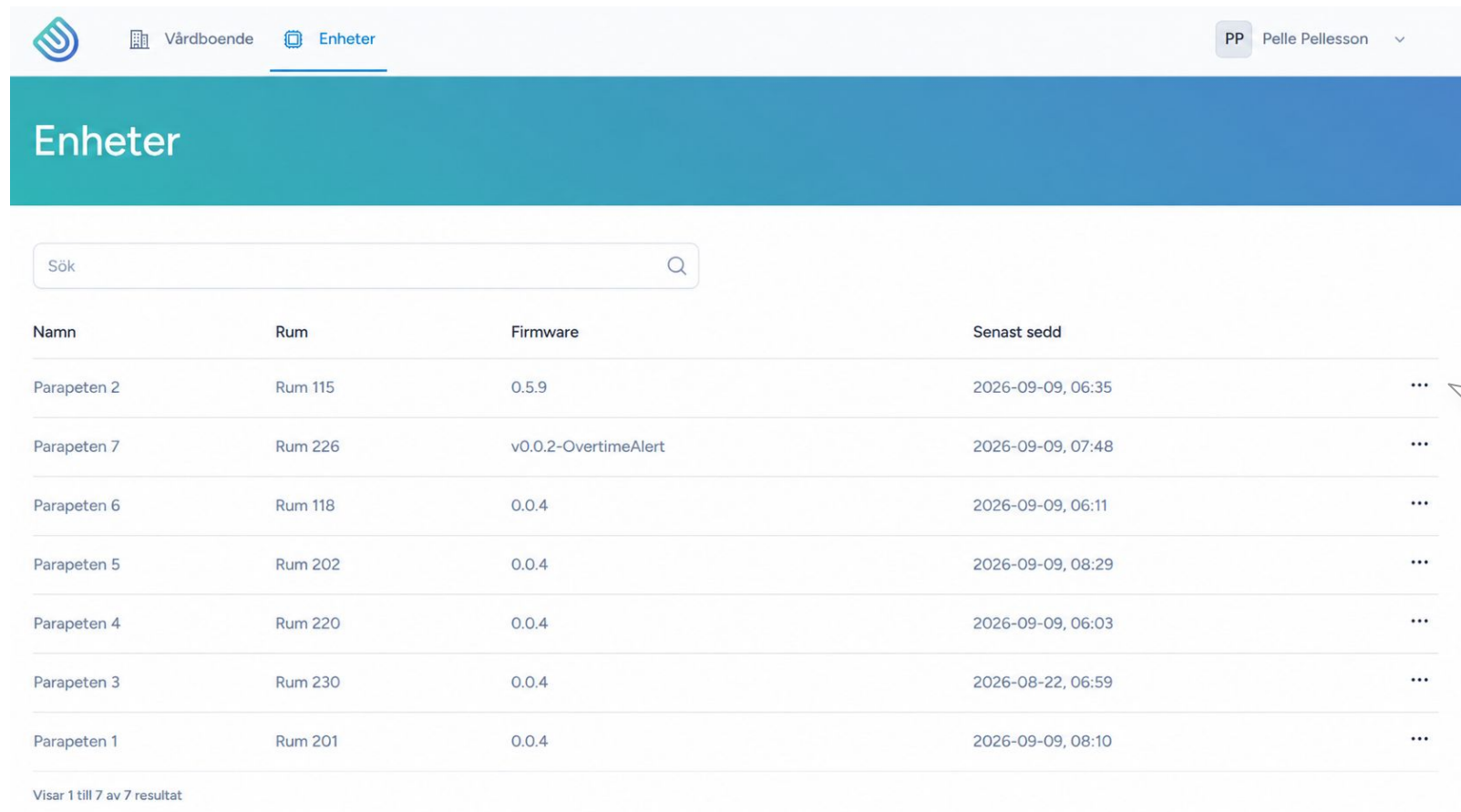

Namn	Rum	Firmware	Senast sedd	
Parapeten 2	Rum 115	0.5.9	2026-09-09, 06:35	...
Parapeten 7	Rum 226	v0.0.2-OvertimeAlert	2026-09-09, 07:48	...
Parapeten 6	Rum 118	0.0.4	2026-09-09, 06:11	...
Parapeten 5	Rum 202	0.0.4	2026-09-09, 08:29	...
Parapeten 4	Rum 220	0.0.4	2026-09-09, 06:03	...
Parapeten 3	Rum 230	0.0.4	2026-08-22, 06:59	...
Parapeten 1	Rum 201	0.0.4	2026-09-09, 08:10	...

Visar 1 till 7 av 7 resultat

Meny för att flytta ZenSeat® mellan rum samt ändra namn

Lista över vårdboendets enheter samt vilka rum de är installerade i.

Vilken version av programvara har ZenSeaten. För ev. supportärenden.

Flytta ZenSeat® till annat rum

Enhetens serienummer.

Enhetens IP-adress i nätverket.

Uppdatera enhet

Gör ändringar i enheten.

Serienummer

SD4Y-U6DR-EWDC

IP

100.96.2.35

Namn

Parapeten 2

Rum

Rum 115

Spara ändringar

Här kan ni namnge enheter. Om fältet är tomt visas serienumret.

Rullgardin för att välja vilket rum enheten är placerad i.

7



Historik

Datum	Kommentar
2026-09-09	Initialt upprättande av dokument
2029-10-18	Ny sida med systemöversikt